



VAKUFORM

Doppelhubpumpepumpe Bedienungsanleitung




Verwendungszweck

Die Doppelhubpumpe wird zur Be- und Entlüftung eines **VAKUFORM** Vakuumsystems verwendet. Sie wird von Hand bedient. Die Verbindung mit dem Kissen erfolgt durch Einstecken der Metalltülle in das Belüftungsventil bis diese einrastet.

Funktion


Luft evakuieren (Absaugen): Verbinden sie den Belüftungsschlauch mit dem farblich rot gekennzeichneten Anschluss am Pumpenkörper und die Tülle mit dem Belüftungsventil des Vakuumpolsters. Durch Auf- und Abwärtsbewegen des Hubkolbens wird Luft aus dem Polsters evakuiert. Es entsteht ein Vakuum.

Luft hineinpumpen: Verbinden sie den Belüftungsschlauch mit dem nicht farblich gekennzeichneten Anschluss und pumpen sie Luft hinein.

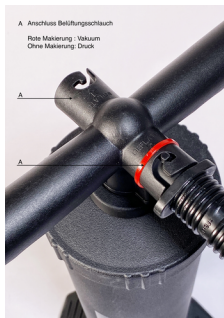

Trennung Belüftungsventil von der Tülle

Durch zurückziehen der **Arretierungshülse** wird das Belüftungsventil des Polsters und die Tülle getrennt.

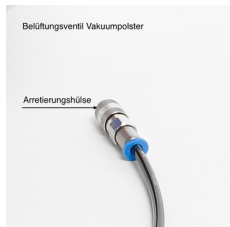

WICHTIG

Vermeiden sie immer ein übermäßiges Aufpumpen des **VAKUFORM** Systems (Balloneffekt).

Die Doppelhubpumpe muss nach jedem Pumpvorgang vom **VAKUFORM** System getrennt werden, da sonst ungewollt Luft in das System eindringen kann.



Artikel:	Doppelhubpumpe
Bestell-Nr.:	30100
Gewährleistung:	2 Jahre
EAN:	4260731383001